

クリップ（黄緑色のストッパー）の使い方

株式会社 メディカルイングス

ストッパーの使い方は下の絵を参考にして下さい。

カタログにも記載しております。



必要な長さを切り取った後 →→→→→→→→ 袋の先端をU字に曲げる
(中のスプリント部は折り曲げる)



ストッパーの黄色の中心部を折曲げた
内側に通し、外筒を外側に通す。



そのまま奥へ押していく
取り外す場合は逆方向へ引き抜く。

ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

